

go!

ONE COMPONENT SELF-ETCHING LIGHT CURED ADHESIVE

ADHESIVO AUTOGRABANTE, DE UN SOLO COMPONENTE, FOTOCURABLE

ADESIVO DE COMPONENTE ÚNICO AUTOCONDICIONANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL

JEDNOSKŁADNIKOWY SAMOWYTRAWIAJĄCY ŚWIATŁOUTWARDZALNY SYSTEM WIAŻĄCY

EINKOMPONENTEN SELBSTÄTZENDES LICHTHÄRTENDES ADHÄSIV

ADHÉSIF AUTO-MORDANÇANT MONO-COMPOSANT

ADESIVO AUTOMORDENZANTE, FOTOPOLIMERIZZABILE, MONOCOMPONENTE

EEN-COMPONENT ZELF ETSSEND LICHTUITHARDEND ADHESIEF

ENKOMPONENTS SJÄLVETSANDE LJUSHÄRDANDE ADHESIV

ENKOMPONENT SELVÆTSENDE OG LYSHÆRDENDE ADHESIV

VALOKOVETTEINEN ITSE-ETSAAVA YKSIKOMPONENTTI SIDOS-AINE

ENKOMPONENT SELVETSENDE OG LYSHERDENDE ADHESIV

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

TEK KOMPONENTLİ SELF-ETCH 7. JENERASYON BOND

JEDNOSŁOŽKOVÉ, SAMOLEPTACÍ, SVĚTLEM TUHNOUCÍ ADHEZIVUM

ADEZIV FOTOPOLIMERIZABIL AUTOGRAVANT MONOCOMPONENT

ΕΔΗΟΚΟΜΠΟΝΗΤΗΝ ΣΑΜΟΕΤΣΑΑΥ ΣΒΕΤΛΟΠΟΛΙΜΕΡΙΖΙΡΑΥ ΑΔΧΕΖΙΒ

JEDNOZŁOŽKOVÉ, SAMOLEPTACIE, SVETLOM TUHNÚCE ADHEZIVUM

EGY KOMPONENSU ONSAVAZO FENYREKOTO RAGASZTOANYAG

JEDNOKOMPONENTNI, SAMOJETKAJUĆI SVJETLOSNO VEŽUĆI ADHEZIV

ENOKOMPONENTEN SAMOJEDKAJČ SVETLOBNOSTRJAJOČ ADHEZIV

VIENOS SUDĒTINĒS DALIES SAVAI ME ĒSDINANTIS ŠVIESA AKTYVUOJAMAS ADHIZYVAS

VIENKOMPONENTA PAŠKODINOŠS GAISMĀ CIETĒJOŠS ADHEZĪVS

ÜHEKOMPONENTNE ISESÖÖVITAV VALGUSKÕVASTUV ADHESIIV

歯科コンポジットレジン用光重合型T液性セルフエッチング接着材

单组份、自酸蚀、光固化粘接剂

ONE BOTTLE 7세대 본딩시스템



ready to go!



**우수한 접착력과
불소방출을 지닌,
7세대 본딩시스템.**



The Dental Advisor.
December 2007,
Vol. 24, No. 10.

It's good to go!

Go! 는 소중한 체어타임을 줄여줄 수 있는 Super Quick 본딩제입니다. 병을 흔들 필요도 없으며, 덴틴을 에칭하거나 닦아낼 필요도 없습니다. 또한 문지를 필요도 없습니다. 한번 도포로 충분합니다. 일단 본딩제를 중합 하면, 바로 수복물을 본딩제 위에 놓으세요. 이제 환자는 "Good to Go!". 사용이 매우 간편하고 빠르기 때문에 소아 환자에 사용하면 좋습니다.

HEMA free

Go!는 HEMA 를 함유하고 있지 않습니다. HEMA 로 인한 피부 트러블로부터 사용자와 스태프를 보호해 줍니다.


술 후 민감성이 없음

Over Etching, Over Dry 의 위험이 없기 때문에 술 후 민감성이 없습니다.

낮은 필름두께


Go! 는 필름두께가 낮아 수복물과 치아 사이의 마진이 보이지 않습니다.

film thickness*

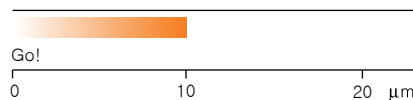

매우 우수한 불소방출

Go!는 불소방출이 매우 높아 치아를 강하게 만들고 2차 우식을 예방하는데 도움을 줍니다.

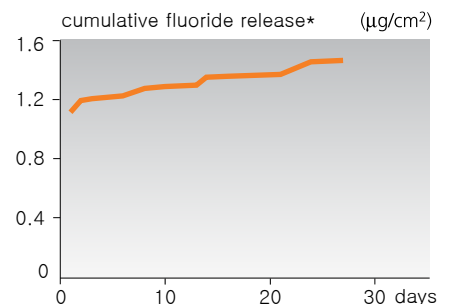


Quick color change

Go! 는 원래 Dark Yellow 색이지만 중합을 하면 투명한 색깔로 바뀝니다. 다음 단계로 가야 할 때를 쉽고 안전하게 알 수 있습니다.



높은 본딩강도

Go!는 높은 본딩강도를 가지고 있어 수복물이 오랜 시간이 지나도 그 자리에 잘 있습니다.

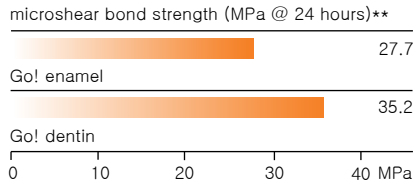

Ultrafine nano fillers

Go!는 7%가 특별 공법의 친수성과 흡수성의 필러로 채워져 있어 중합 후에 물을 좋아하는 성질에서 물을 밀어내는 성질로 바뀝니다. 이는 표면에 잔여의 물을 남기지 않아 수복물의 완벽한 본딩을 만들어 줍니다.

용도

- 직접 레진수복의 본딩
- 레진시멘트를 이용한 간접수복물의 본딩
- 오래된 아말감에 컴포지트 레진의 본딩
- 교정 브라켓****
- 컴포지트 레진, 포세린, 하이브리드 세라믹 수복물 Repair
- 지각과민을 야기하는 노출된 근관 표면의 실링
- 간접수복물을 붙이기 전에 Cavity 실링
- 지각과민 치료
- Cervical 부위 통증 감소
- 크라운 프랩

***** etching required

No water residue

다른 7세대 본딩제와는 달리, Go!에서는 본딩을 방해하는 수복물과 본딩제 사이에서의 물방울이 발견되지 않습니다.

Go! surface



Microscopic image of Go! after polymerization.***

G-Bond surface****



Microscopic image of G-Bond after polymerization.***

Instructions:

- 1 치아를 깨끗이 세척하고 격리시키십시오.
- 2 Excess Water 를 제거하십시오. Moist 한 상태를 유지하는 것이 좋습니다. 하지만 Dry 한 표면도 괜찮습니다.
- 3 모든 표면에 Go! 를 도포하고 20초 동안 그대로 두십시오.



- 4 Dry, Oil free 에어로 5초 동안 강하게 날려 버리십시오. 표면은 윤기있게 보여야 합니다.



- 5 10초 동안 광중합 하십시오. 중합 후 Dark Yellow 색이 투명한 색으로 바뀌는 것을 확인하세요.



- 6 제조사의 지시에 따라 컴포지트 레진 혹은 컴포머를 도포하십시오.



Clinical photos courtesy of Dr. Geoff Knight, Melbourne, Australia

go!



*SDI Test Data. **University of Melbourne ***University of Adelaide, Dr. G. Knight. ****Not the registered trademark of SDI Limited.



Go! 5mL Bottle Kit
1 x Go! 5mL bottle
50 x Points disposable brush applicators
1 x Mixing well
Reorder 8100400

Go! Single Dose Kit
50 x Go! 0.1mL Single Dose
50 x Points disposable brush applicators
1 x Single dose holder
Reorder 8100401



Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



경기도 고양시 덕양구 통일로 140
삼승테크노밸리 B동 426호.
Tel. 02-2219-4567. Fax. 02-2219-4568.
Email. nicelcg@naver.com.
www.dentalcube.co.kr

