

치과용아말감혼합기 사용설명서

작성일 : 2012년 5월 01일, VER 1.0

1. 사용방법 또는 조작방법

1) 사용 전 준비사항

- ① Ultramat S의 외관상 파손부위가 있는지 확인한다.
- ② 안전한 곳에 Ultramat S를 위치시킨다.
- ③ 전원을 연결한다.
- ④ 본체 뒷면의 전원스위치를 ON상태로 위치한다.

2) 사용 방법

- ① 플라스틱 안전커버를 열고 Capsule을 포크에 장착한다.
- ② 완전히 장착되었는지 확인 후 플라스틱 안전커버를 다시 덮는다.
- ③ 적절한 진동시간과 세기를 셋팅한 후 작동시킨다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

- ① 사용 후 전원을 차단한다.
- ② 물기가 본체에 흘러가지 않도록 보관한다.
- ③ 강한 충격이나 추락으로 제품이 손상되지 않도록 한다.

2. 저장방법

해당사항없음

3 유효기간

해당사항 없음

4. 사용 시 주의사항

- ① Capsule이 포크에 정확히 장착되었는지 확인 한다.
- ② 투명커버를 완전히 덮은 후 작동시킨다.
- ③ 사용 후 전원을 차단시킨다.

5. 수입업자의 상호, 주소

- (1) 상 호 : 제이에스아이(JSI)
- (2) 주 소 : 경기도 고양시 덕양구 행신동 996-6 구암프라자 302-3

6. 제품명, 형명

- (1) 제품명 : 치과용 아말감 혼합기
- (2) 형명(모델명) : ULTRAMAT S

7. 수입업허가번호, 수입품목신고번호

- 1) 수입업허가번호 : 제2647호
- 2) 수입품목신고번호 : 서울 수신 12-516호

8. 제조번호, 제조연월일 : 포장 참조

9. 사용목적 : 치과용 아말감을 혼합하는 장비

10. 포장단위

- (1) 포장단위 : package

12. 본 제품은 “의료기기”임